



深热博士康养仪

产品使用说明书

AFURO 阿夫若®



专利号：2021227438195 专利号：2021222377246 专利号：2021223182334 专利号：2021229573223



# DEEP DOCTOR

WELLNESS DEVICE

AFURO 阿夫若®  
深热博士康养仪



## AFURO 阿夫若®

深热博士美容仪是“AFURO 阿夫若”品牌旗下“DEEPDOCTOR”核心技术的系列美容产品以生物组织能量精准调控为核心，基于国际成熟的电容性与电阻性双模能量转移技术，通过模拟人体自然修复信号，深层穿透，激活皮肤深层细胞潜能的自我更新机制

### 技术原理 Technology

DEEP DOCTOR 将介于300kHz至1.5MHz的交流正弦波电流应用于人体某一部位时，其能量传递与组织响应的过程，本质上等同于将电流作用于该部位的人体阻抗，而这一人体阻抗在电学模型中，可等效为由并联电器（R）和电容器（C）组成的电路。通过多种模式与不同人体部位组合可以更有效的利用人体阻抗效应让电流到达更深层，实现能量的传递，更好实现能量的转移。





# DEEP DOCTOR

WELLNESS DEVICE

AFURO 阿夫若®

深热博士康养仪

## 应用范围

## Indications



彤感舒缓



亚健康



面部提升



身体年轻化



脂肪管理



头皮护理



寒态管理



紧致肌肤



产后护理



提升轮廓



多维度筋膜护理



促进精华无创吸收

\* 本产品仅用于美容养生，非医疗用途，不替代医疗。





# DEEP DOCTOR

WELLNESS DEVICE

AFURO 阿夫若®  
深热博士康养仪



## RET

### 电阻模式



深层组织深度温热

Deep tissue deep heat

电阻模式通过电阻耦合原理，将射频能量直接传递至皮肤深层组织.实现深层温热。通过康养仪多种专业探头，实现深层组织深度加热。

## CAP

### 电容模式



浅层组织均匀加热

Uniform heating of superficial tissues

电容模式通过电容耦合原理，将射频能量集中于皮肤深浅层组织.实现均匀加热，电容探头多种造型材质，可以选择选择，针对不同身体部位。





# DEEP DOCTOR

WELLNESS DEVICE

深热博士康养仪



## 筋膜刀

Fascia scraper



深入筋膜层温热放松

Deep fascia layer warming relaxation

筋膜刀是一种用于辅助筋膜放松的工具，结合了现代身体护理与软组织舒缓技术，旨在改善筋膜滑动性、缓解肌肉紧绷感、帮助提升关节活动舒适度。它通过特定的手法对筋膜进行刮擦、加压或牵拉，帮助分解黏滞感促进组织舒适。

### 筋膜放松

通过刮擦施加压力  
帮助加速局部血流  
改善组织滑动性

### 机械刺激促进局部循环

帮助排出代谢废物（如乳酸）  
减轻运动后的酸胀感  
增强筋膜弹性感，使身体活动更轻松

### 专业刀面造型

实现多面按摩  
操作舒适轻松  
独特头端指压与凹面造型



# DEEP DOCTOR

WELLNESS DEVICE

AFURO 阿夫若®  
深热博士康养仪

## 手腕电极

wrist electrode



## 无接触式温热体验

Contactless warming experience

手腕电极是能量护理系统中创新模式的核心配件，聚焦“无接触、精准化、人机协同”理念，以护理师双手为能量传导媒介，突破传统电极贴片的物理限制，为肌肉放松、身体舒缓等场景提供更灵活高效的护理方案。

### 无创化体验

摒弃传统电极片的介入式操作  
手腕穿戴式导电模块传导能量实现  
“无接触式”温热护理  
既避免皮肤敏感或刺激等顾虑  
又保留人体自然体感互动性  
舒适状态下接受深层温热能量

### 人机协同

轻量化、防滑材质设计  
贴合手腕生理曲线  
推拿、按压、拉伸  
等手法中双手动作不受限

### 场景兼容

在“静态固定”  
与“动态手法”间无缝切换，多场  
景兼容，  
能量稳定渗透至深层组织，  
提升产品科技感创新双手腕电极按

创新双手腕电极按摩





# DEEP DOCTOR

WELLNESS DEVICE

## AFURO 阿夫若 深热博士康养仪

### 产品规格


#### Product Specifications



产品名称:	深热博士 康养仪	输出功率:	350W
产品型号:	AFR-D6	输入电流:	110V~ 220V 50Hz-60Hz
产品净重:	600g	波动模式:	750kHz、500kHz、448kHz、300kHz
产品材质:	钣金件,铝合金		1MHz、1.2MHz、1.5MHz共7种频率。
产品尺寸:	226mmx194mmx116 mm	探 头:	圆形可选择 筋膜刀, 电极手表,



RET CAP 操作手柄

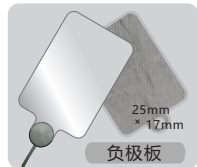

不锈钢与导电布料两种材质可选择



多功能五金挂件



电源线

专业产品配件  
Product components

电容探头 (具体探头按客户选择)

171mm×90mm **筋膜刀**



筋膜松懈  
疏导经络  
舒缓后颈  
腰腹肩臂  
背部腿部

FS-01 **1**

49mm×40mm **手腕微导电极**



私密护理  
胸部护理  
软化结块  
脸部指法  
穴位按摩

WS-01 WS-02 **2**

64mm×30mm **纳米弧面刮痧头**



刮痧清淤  
颈部腋下  
腿窝

C0F-01 **3**

17mm **纳米精雕点塑头**



眼纹淡化  
面颊紧致  
下颌收紧  
穴位按摩

C0-17 **4**

40mm **纳米小号平导头**



温和穴位按摩  
面部颈部紧致  
脚部按摩

CO-40 **5**

65mm **纳米中号平导头**



腿腰腹臀肩背  
温和脂肪管理  
塑形放松排油

CO-65 **6**

75mm **纳米大号平导头**



腿腰腹臀肩背  
温和脂肪管理  
塑形放松排油

CO-75 **7**

65mm **纳米睡眠五导探头**



睡眠管理  
头部抗衰  
缓老养护

C0-M65 **8**

75mm **纳米多维触压头**



强度  
脂肪管理  
腿腰腹臀  
塑形放松  
排油

C0-M75 **9**

电阻探头 \*电阻探头是强热模式，适合技师操作，自用需提前咨询。

注：操作区域为建议区域，具体按专业人员操作习惯，探头尺寸如有更改不另行通知

40mm **不锈钢小号平导头**



深度穴位按摩  
面部颈部护理  
脚部按摩

RO-40 **10**

65mm **不锈钢脊柱双极头**



背脊舒缓  
平衡体态  
脚部按摩

RO-65 **11**

75mm **不锈钢大号平导头**



腿腰腹臀肩背  
深度脂肪管理  
塑形放松排油

RO-75 **12**

65mm **不锈钢中号多维触压头**



腿腰腹臀肩背  
深度脂肪管理  
塑形放松排油

RO-M65 **13**

75mm **不锈钢大号多维触压头**



腿腰腹臀肩背  
深度脂肪管理  
塑形放松排油

RO-M75 **14**



# DEEP DOCTOR

WELLNESS DEVICE

AFURO 阿夫若®  
深热博士康养仪

## 2 挂件安装

挂件两个支架对准左右与圆形定位卡  
插进卡位固定好支架，悬挂配件



触摸屏幕

侧面出风口

## 3 产品构成

手柄临时放置位 (选配, 根据实际功能)



电源开关  
保险  
电源插座

RET  
手柄插座

负极板插座  
CAP  
手柄插座

光标旋钮



## 1 探头安装

对准插座定位平面，  
按锁紧方向旋转，  
连接探头



定位平面 锁紧符号



螺牙旋转  
连接不锈钢底座

## 产品装配 Product assembly

## 4 插座安装

插座请将箭头  
对准箭头位置  
再插入拔插头时，  
请滑动插头后扣位，  
再拔出插头

直径80mm以下探头

直径65mm以下探头

直径40mm以下探头

操作头

手腕电极



筋膜刀



# DEEP DOCTOR

WELLNESS DEVICE

AFURO 阿夫若®  
深热博士康养仪

人机界面控制  
Touch Control

三功能选择



选择手柄探头



调整功率，时间参数



启动仪器



播放运行动画，可暂停或退出，从新选择





# DEEP DOCTOR

WELLNESS DEVICE

AFURO 阿夫若®  
深热博士康养仪

## 安全注意事项 Safety Precautions

AFURO 为了正确安全地使用本仪器



警告

为了防止发生事故或造成身体不适

- ◆使用下述医用电子仪器的人，请勿使用本仪器。否则可能因医用电子仪器的错误运行导致事故和身体不适。
  - 起搏器等人体植入式医用电子仪器
  - 人工心肺机等用于维持生命的电子仪器
  - 心电图仪、输液器等佩戴型医用电子仪器
- ◆孕妇、对温度不敏感者或有以下疾病血栓性静脉炎、发烧感染、软骨生长、皮肤类疾病、癌症等



禁止

警告



禁止

- 请勿和其他仪器同时使用
- 请勿用于其它目的、请勿在损坏、故障的状态下使用。本仪器为专用护理仪、请勿用于治疗目的或其他用途。
- 请勿窥视或直视LED光。
- 请勿连续用于同一部位，否则可能会伤害肌肤或造成感染、炎症、出血、色素沉淀等肌肤问题或导致症状恶化。
- 请勿使用在宠物身上。



禁止浸水

- 请勿将本仪器浸在水中、或是将水淋到或洒到本仪器上。（否则会导致触电、火灾或故障）



禁止湿手使用

- 请勿以湿手触碰仪器。（否则会导致触电、受伤）



禁止

- 请勿在稀释液、挥发油、去光水、喷雾等可燃性物品附近使用。
- 请勿使用非专用AC适配器。请勿将专用AC适配器连接其他仪器。（否则会导致火灾、触电或故障）



禁止

- 请勿损坏插头线。
- ※请勿毁伤、强行弯曲、拉扯、扭曲、在上面放置重物、紧夹等。（否则会导致火灾、触电或故障）
- 请避免插座过载。（否则会导致发热或火灾）

注意

1

- 特别护理请每1部位=每周护理1次
- 第1~2周请每周护理2次，之后的第3周开始视肌肤状态而定，约每周护理1次。
  - 过度护理反而不益于肌肤健康。
- 每天的日常护理请以每1部位=每天或2天一次的频率进行。
- 请视肌肤状态使用。

2

- 肌肤状态因身体状况而异。
- 使用时请视肌肤状态而定，若肌肤出现皮疹、发红、瘙痒等异常状况，请停止使用并咨询专科医生。



必须遵守

### ●清洁方法

- 请用浸过水并拧干的软布擦去本仪器污垢。用硬布擦拭的话会损伤本仪器、导致功能降低。
- ※请勿使用碱剂、酒精、稀释液、挥发油等溶剂或卸甲水、研磨粉、热水、药品类。
- ※本仪器上沾有专用水或美容液时，请于清洁后，再行保管。



**DEEP DOCTOR**  
WELLNESS DEVICE

**AFURO** 阿夫若®  
深热博士康养仪



## WARRANTY CARD 保修卡

商品名	DEEP DOCTOE 深热博士康养仪
产品型号	AFR-D6
购买店铺	
购买日	年 月 日
顾客姓名	
联系地址	
联系电话	

## [ 保修规定 ]

按产品保修卡记载，提供免费维修服务。自购买日起，在保修期内发生故障，请附上本保修卡的复印件，委托购买店铺或代理店进行修理。  
 ※如未填写购买日、购买店铺名、顾客姓名、地址、电话号码，本保修卡将视作无效，请务必事先确认没有漏写。  
 ※配件（使用说明书兼保修卡）不适用保修。

◆即使在保修期内，若属下列情况，无法提供免费保修。

- 本保修卡上没有填写购买日、购买店铺名、顾客姓名、地址、电话号码
- 运输、移动时发生摔落、水淹等因使用者的不当处理而引起的故障及损伤
- 火灾、天灾、异常电压而引起的损失及故障
- 因连接其他仪器而引起的本仪器故障
- 使用非本仪器附属专用配件而引起的故障
- 非本公司进行的修理、调整、改造
- 没有出示本保修卡

本保修卡遗失不补，请妥善保管。