



AFURO 阿夫若®



双模无创水光仪

Needle-Free
Dual-Mode Hydra Injector

产品使用说明书

※使用前请仔细阅读本使用说明书，阅读后请妥善保管
Please read this manual carefully before use and keep it properly after reading.



Needle-Free 双模无创水光仪 Dual-Mode Hydra Injector



双模无创水光仪

传统水光产品的换代升级，改变传统水光喷雾效果的原理采用专利微滴磁力音速喷射技术，纳米级喷射进入皮肤深层反复喷涂到皮肤表层，实现更易渗透，传统喷雾颗粒太大无法渗透进入皮肤层，通过高压力，高频率反复音速喷射形成微滴渗透效果，让皮肤，头皮，身体焕然一新，微滴水光，美容科技的完美体现！



微滴磁力音速喷射技术

Micro-droplet magnetic sonic jetting technology





Needle-Free 双模无创水光仪 Dual-Mode Hydra Injector

产品规格

Product Specifications

产品名称:	双模无创水光仪	输出功率:	400W(待机功率40W)
产品型号:	AFR-D5	输入电流:	220V~ 50Hz-60Hz
产品净重:	600g	启动方式:	IC卡喷头启动
产品材质:	塑料ABS 钣金件,铝合金	产品标准:	CE RHOS
产品尺寸:	200mmx390mmx360 mm	产品配件:	脚踏开关, 加水管, 排气管, 针筒, IC探头, 手柄, 电源线





Needle-Free 双模无创水光仪 Dual-Mode Hydra Injector

产品构成 Product Composition



主机



保护盖




注射针筒



水光探头




水光手柄

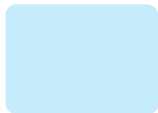

电源线




脚踏开关

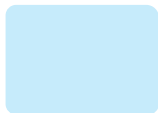

加水管



排气管

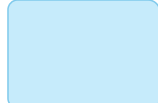




Needle-Free 双模无创水光仪 Dual-Mode Hydra Injector



产品构成 Product Composition

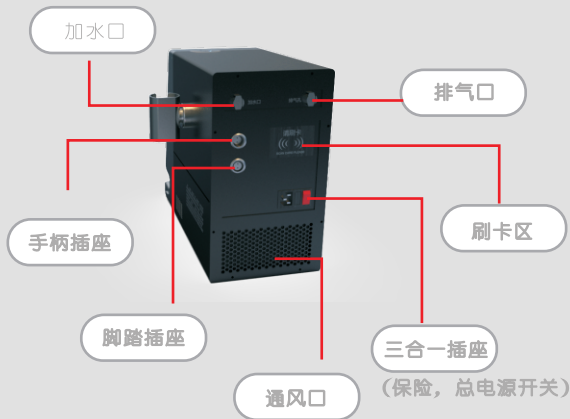



Needle-Free 双模无创水光仪 Dual-Mode Hydra Injector

产品装配 Product assembly



使用前准备:

产品使用前, 请插入排气孔管与加水口管,
加入1.2L≈2瓶半纯净水到加水口;



约500mL左右




使用一年后,
用底部排水孔排空水箱
从新加水;
如长时间不使用产品
请排空水箱;



使用3个月后,
加入一瓶矿纯净水
约500mL左右
补充损耗水量;

排气孔

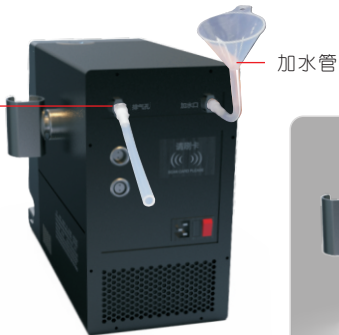

加水管

排水孔

插好电源线与产品插座



水光手柄

脚踏开关



Needle-Free 双模无创水光仪 Dual-Mode Hydra Injector

产品装配

Product assembly

产品操作流程：




打开注射器包装
加入水光液体产品



注射器插入探头倾斜进水口
旋转按定位方向固定水光探头
启动机器，调节水光强度和雾量大小
开始操作
操作完成后，清洁并用保护盖盖住探头



(一) 插好电源线，启动总电源开关

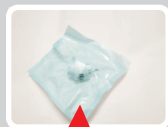


用探头上条形码
对准刷卡区

(二) 打开探头包装



(三) 刷卡使用

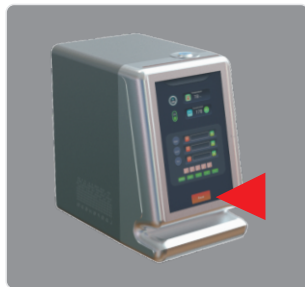

(四) 启动界面，调节参数




Needle-Free 双模无创水光仪 Dual-Mode Hydra Injector


人机界面控制 Touch Control



(一) 刷卡后显示剩余次数与做了多少次

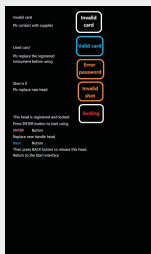

(二) 如遇异常显示控制

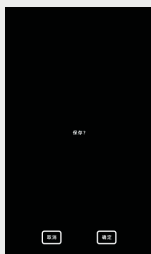

(三) 保存设置



档位加减
速度加减
模式



功能开关


档位加减
速度加减
流量加减
模式

启动暂停



温度调节
发射量

英文界面

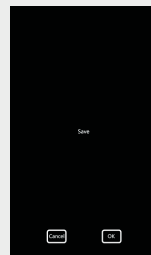


功能开关
档位加减
速度加减
模式



温度调节
发射量

功能开关
档位加减
速度加减
流量加减
模式

启动暂停

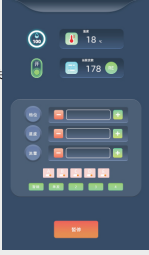

温度调节
发射量

中文界面



Needle-Free 双模无创水光仪 Dual-Mode Hydra Injector

调节发射喷雾效果


微滴针管

微滴操作头


微滴手柄




控制操作距离

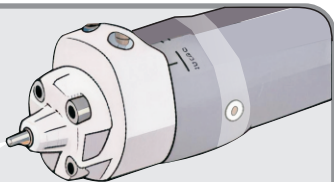


微滴磁力音速喷射技术

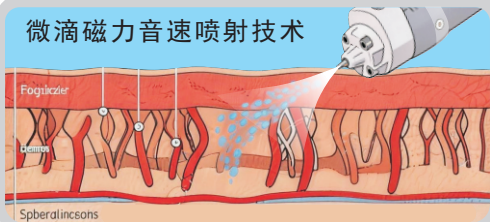

反复微滴音速喷射
到皮肤表层

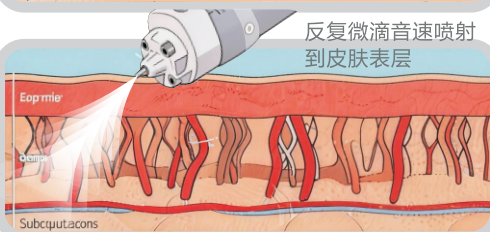

微滴更易渗透!

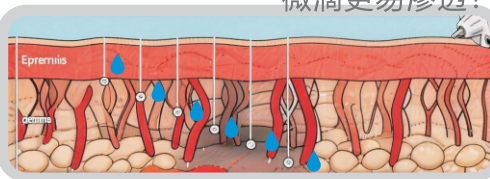




Needle-Free 双模无创水光仪 Dual-Mode Hydra Injector

根据实际位置调整产品雾化效果

调整好与皮肤间距离

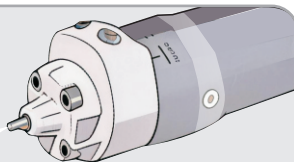

微滴磁力音速喷射技术

反复音速喷射到皮肤表层 微滴更易渗透！

使用中 通过脚踏开关控制出雾，操作更方便。



音速喷射到皮肤表面





Needle-Free 双模无创水光仪 Dual-Mode Hydra Injector

安全注意事项 Safety Precautions

1. 本仪器需由专业人员操作，请勿自行使用；
2. 操作仅可使用合规成分，严禁私自调配不明液体；
3. 若术后肌肤出现持续红肿、感染等异常情况，需及时就医处理。



一 禁忌人群



以下人群严禁使用本仪器操作：


1.	皮肤存在破损、炎症、痤疮感染、过敏急性期者；
2.	瘢痕体质、凝血功能障碍者；
3.	孕期、哺乳期女性；
4.	高血压、糖尿病等基础疾病未控制者；
5.	对操作成分过敏者；

二 美容前准备

1. 操作前7天，避免暴晒、去角质、刷酸及其他刺激性美容项目；
2. 操作前需彻底卸妆，保持面部清洁、干爽，无任何彩妆残留；
3. 检查仪器性能，确保耗材完好，一次性耗材仅限单人单次使用。

三 操作须知

1. 操作前务必为顾客佩戴专业防护眼罩，做好眼部防护；
2. 操作人员全程佩戴无菌手套、口罩，遵循无菌操作流程；
3. 仪器压力从低档位逐步调节，贴合皮肤匀速操作，避开眼周、唇周等薄弱部位；
4. 操作中若顾客出现明显刺痛、泛红，立即停止操作。

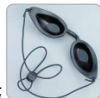

四 美容术后护理



1. 后即刻使用医用修复面膜冷敷，舒缓肌肤；
2. 术后4小时内面部避免碰水，24小时内不化妆、不使用普通护肤品，仅用医用修复类产品；
3. 术后3-7天，忌辛辣刺激食物、酒精，不蒸桑拿、不剧烈运动；
4. 术后严格做好物理防晒，避免色素沉着，暂停其他医美项目。

五 仪器维护



1. 每次操作后，及时清洗、消毒仪器管路及配件，避免残留液体；
2. 仪器存放于干燥、通风、无尘环境，定期检查校准设备压力；
3. 非专业人员请勿私自拆卸、改装仪器。



Needle-Free 双模无创水光仪 Dual-Mode Hydra Injector

WARRANTY CARD 保修卡

商品名	双模无创水光仪
产品型号	AFR-D5
购买店铺	
购买日	年 月 日
顾客姓名	
联系地址	
联系电话	

[保修规定]



按产品保修卡记载，提供免费维修服务。自购买日起，在保修期内发生故障，请附上本保修卡的复印件，委托购买店铺或代理店进行修理。
※如未填写购买日、购买店铺名、顾客姓名、地址、电话号码，本保修卡将视作无效，请务必事先确认没有漏写。
※配件（使用说明书兼保修卡）不适用保修。

◆即使在保修期内，若属下列情况，无法提供免费保修。

- 本保修卡上没有填写购买日、购买店铺名、顾客姓名、地址、电话号码
- 运输、移动时发生摔落、水淹等因使用者的不当处理而引起的故障及损伤
- 火灾、天灾、异常电压而引起的损失及故障
- 因连接其他仪器而引起的本仪器故障
- 使用非本仪器附属专用配件而引起的故障
- 非本公司进行的修理、调整、改造
- 没有出示本保修卡

本保修卡遗失不补，请妥善保管。